

Een hydrocolloïde wondverband
in verschillende **vormen en**
maten voor uw patiënten



WAT IS HET?

NU-DERM™ Hydrocolloïd-verbanden zijn ontwikkeld om het wondmilieu vochtig te houden bij droge tot matig exsuderende wonden. Het assortiment omvat drie varianten in verschillende vormen en maten. Alle verbanden zijn waterdicht en kunnen tijdens het douchen blijven zitten.

NU-DERM™ Hydrocolloïd-assortiment:

NU-DERM™ Border

Dit veelzijdige verband heeft een toplaag van semipermeabel, niet-schurend polyurethaanfolie en afgeschuinde randen rondom. Ook de rand zelf bestaat uit huidvriendelijk zelfklevend hydrocolloïd materiaal. NU-DERM™ Border is geïndiceerd voor de behandeling van licht tot matig exsuderende wonden.

NU-DERM™ Standard

Dit verband heeft een bovenlaag van filmgecoat polyurethaanschuim, afgeronde hoeken en een gelijke dikte. NU-DERM™ Standard is geïndiceerd voor de behandeling van licht tot matig exsuderende wonden.

NU-DERM™ Thin

De semitransparante variant. Dit veelzijdige verband heeft een bovenlaag van niet-schurend folie. Het wondbed kan eenvoudig en zorgvuldig worden geobserveerd zonder het verband te verwijderen.

HOE WERKT HET?

NU-DERM™ Hydrocolloïd-verbanden helpen een vochtig wondmilieu te behouden, waardoor autolytisch debridement gestimuleerd wordt en de granulatie kan plaatsvinden onder optimale omstandigheden.

Ontwikkeld ter bescherming van laagrisicowonden tegen bacteriële contaminatie.

Vochtafvoer

Uit een in-vitrotest bleek het vochtafvoerend vermogen[†] van NU-DERM™ Hydrocolloïd in een periode van 48 uur, twee keer groter te zijn dan Duoderm CGF en Duoderm Signal[†]

2x

GEBRUIKSINDICATIES

NU-DERM™ Border en NU-DERM™ Standard zijn met name geïndiceerd voor de behandeling van licht tot matig exsuderende drukulcera en ulcera aan het been.

NU-DERM™ Thin is met name geïndiceerd voor de behandeling van oppervlakkige droge of licht exsuderende wonden, operatiewonden en oppervlakkige (schaaf)wonden; het kan echter ook worden toegepast bij kleine wonden aan het eind van het genezingsproces.

NU-DERM™ Hydrocolloïd-verbanden

Afmetingen	Verband per doos	Systagenix code
NU-DERM™ Border Thin		
10cm x 10cm	10	HCT101
NU-DERM™ Standard		
10cm x 10cm	5	HCF204
20cm x 20cm	5	HCF208
NU-DERM™ Border		
5cm x 5cm	20	HCB102
10cm x 10cm	10	HCB204
15cm x 15cm	5	HCB106
20cm x 20cm	5	HCB108
NU-DERM™ Border elleboog en hiel		
8cm x 12cm	10	HCH207
NU-DERM™ Border Sacrum		
15cm x 18cm	5	HCS100

Neem voor meer informatie over de voordelen van NU-DERM™ Hydrocolloïd contact op met uw account manager of kijk op gdmedical.nl

*Neem contact op met een zorgverlener alvorens NU-DERM™ Hydrocolloïd-verbanden te gebruiken voor letsel veroorzaakt door tuberculose, syfiis of diepe schimmelinfecties, kanker en wonden waarbij een hoog risico op infectie bestaat. † Met uitzondering van de Thin-variant. Referenties 1. Date on file.